



FICHE TECHNIQUE MASQUE BARRIÈRE

Ce masque n'est en aucun cas un masque de type FFP2

Ce masque a validé les tests faits par la DGA en date du 24/03/2020 sous la référence RP/20-1898/DGA MNRBC/2000305/NP Version 1. Ces tests avaient pour objectif de vérifier la filtration de ce masque ainsi que la perméabilité à l'air.

Les résultats obtenus ont permis de catégoriser ce masque dans la **catégorie 1** définie par l'État, permettant de justifier que ce masque respecte les attentes et les spécifications de l'AFNOR S76-001. D'après la DGA, le masque présente une perméabilité à l'air de plus de 142 l/m².s-1 et une filtration de plus de 96% des particules de 3 µm.

La DGA a testé le masque après 5 lavages et celui-ci présente une amélioration de la filtration en passant de 96% à 99%.




Le masque est composé de 3 couches :

- Une couche de tissu chaîne et trame en Polycoton
- Une couche d'un filtrant matelassé en double couche
- Un élastique est situé sur l'arrière du masque, il est inséré dans des encoches sur les côtés du masque. Ces encoches permettent à l'utilisateur de ne pas contaminer le masque lors du placement de celui-ci sur le visage.

Composition :

Tissu de surface : 60% polyester 40% coton

Filtrant double couche : 93% coton 7% polyester

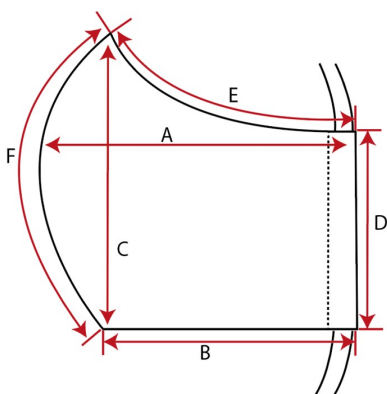

Descriptif de la taille du masque :

| Taille | TU en cm |
|------------------------------------------|----------|
| A - Largeur | 14,5 |
| B- Largeur bas | 11,5 |
| C- Hauteur de la pointe au bas | 14 |
| D - Hauteur côté | 10 |
| E - Longueur courbe de la pointe au côté | 12,5 |
| F - Longueur courbe de la pointe au bas | 17 |

Conditions d'utilisation et d'entretien


Consignes d'utilisation :

Pour mettre le masque barrière, il est important de se laver les mains avant de le placer sur le visage (soit avec du savon, soit avec du gel hydroalcoolique).

S'assurer que le masque a bien été lavé avant utilisation.

Mettre le cordon inférieur autour du cou et ensuite poser le menton dans le masque.

Une fois cette opération effectuée, tirer le cordon supérieur sur le haut du crâne afin de respecter le placement suivant.

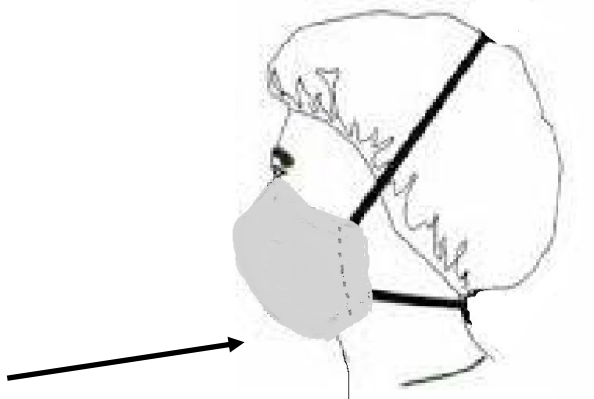

Le masque doit être placé comme ceci sur le visage :



Il est nécessaire de changer de masque toutes les 4 heures.



Pour retirer le masque, n'utiliser que les élastiques afin de ne pas toucher la face avant du masque. Le déposer dans un sac plastique afin de l'isoler.

• Conditions de nettoyage :

- Laver à **60°C pendant 30 min au minimum**, à part de tout autre linge, avec détergent classique avant le premier usage et **après chaque utilisation**.
- Sécher le masque via un séchage mécanique ou en séchage à l'air libre si celui-ci ne dépasse pas 2 heures.
- Repasser le masque sur la surface en chaîne et trame à 120°C afin de détruire les bactéries restantes.
- Durée de vie prévue du masque : entre 5 (certifié DGA) et 30 utilisations (tests internes à la société).

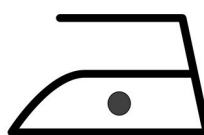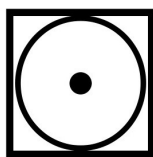

Attention à respecter les gestes barrières, le masque ne dispense pas de respecter ces gestes essentiels à la sécurité de tous.